

## **Инструкция по применению: Пластырь разогревающий Кетонал Термо®.**

### **СОСТАВ**

Железный порошок, вода, соль, активированный уголь.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Кетонал Термо®, разогревающий пластырь помогает расслабить глубокие мышцы, принося облегчение при болях в спине и плечах.

- Действует до 10 часов;
- Одноразовый пластырь;
- Только для наружного применения: наносится на кожу или на одежду из чистого хлопка (если ощущаемая температура слишком высокая);
- Средняя температура 45 +/- 5°C.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Разогревающий пластырь Кетонал Термо® нельзя использовать:

- во время сна;
- лицам, которые не имеют возможности самостоятельно удалить пластырь, если ощущаемая температура окажется неприемлемо высокой;
- на поврежденных участках кожи, на открытых ранах, а также в месте травмы или после инъекции;
- во время приема душа;
- если упаковка повреждена (порванная оболочка);
- если пластырь имеет механические повреждения

Перед применением посоветуйтесь с врачом или фармацевтом в случае:

- воспаления суставов, диабета, нарушения кровообращения;
- посттромботического воспаления сосудов;
- беременности;
- остеопороза;
- расстройства ощущений;
- болезней кожи.

Если ощущается избыточное тепло в месте применения пластыря, немедленно удалите его для того, чтобы избежать раздражения и отечности кожи.

- Не прикладывать пластырь на шею, подмышечную область, паховую область- Женщинам не следует применять пластырь во время менструации.
- Не разогревать использованный пластырь повторно (например, в микроволновой печи).
- Пластырь содержит железный порошок. Избегайте его контакта с глазами.
- В случае попадания железного порошка в глаза или на кожу, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
- В случае проглатывания порошка, следует немедленно обратиться к врачу.
- Не прикреплять к другому пластырю.
- Если боль не уменьшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
- Избегать попадания солнечных лучей на пластырь.
- Интервал между применениями пластыря на одном и том же участке должен составлять не менее 24 часов.
- При применении у пациентов 55+ лет, разогревающий пластырь Кетонал Термо лучше прикладывать поверх нижнего белья или на рубашку из натурального хлопка, а не на кожу.
- Пластырь предназначен для взрослых.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Осторожно порвите пластиковую упаковку с пластырем в месте насечки. Удалите с липкой части защитную пленку и прижмите пластырь на больное место к чистой и сухой коже или белью из чистого хлопка.

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Вдали от света, при комнатной температуре, в сухом и недоступном для детей месте. Не держать в холодильнике.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 3 года. Не использовать после истечения срока годности

**РАЗМЕР ПЛАСТЫРЯ:** 140 x 95 (+/-5 мм)

**УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:** без рецепта врача, через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговых сетей.

### **Производитель:**

Мастер Фарм Польска Сп. з о.о., 90-752, Польша, г.Лодзь, ул. Зелиговского, д.3/5

### **Владелец регистрационного удостоверения:**

Сандоз Фармасьютикалз д.д., 1000, Словения, г. Любляна, ул. Веровшкова, 57

### **Претензии потребителей направлять по адресу:**

123317 ЗАО «Сандоз» Российская Федерация, Москва, Пресненская наб., д.8., стр. 1, тел. 8(495) 660-75-09